



Tiefziehfolien

Der Standarddurchmesser aller Dreve Tiefziehfolien ist 120 mm. Alle in der Übersicht aufgeführten Artikelnummern beziehen sich auf diese Standardgröße.

Auf Anfrage sind auch folgende Sondermaße lieferbar:

- Folien mit Durchmesser 125 mm
- quadratische Folien mit der Seitenlänge 120 und 125 mm

Die angegebenen Aufheizzeiten der Tiefziehfolien

- gelten für vorgewärmte Geräte
- können sich durch den Alterungsprozess der Heizelemente bedingt verändern
- verkürzen sich bei Dauerbetrieb des Gerätes



Auf der Vorderseite der Übersicht finden Sie die Materialien für das jeweilige Einsatzgebiet; auf der Rückseite die Artikelnummern und Verpackungseinheiten.

Allgemein

Standardgröße



Sondergröße

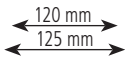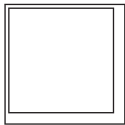

Allgemein

Drufoplast 2 / 3 mm

rosa

- sehr hohe Bruchfestigkeit
- passende Löffelgriffe erhältlich

Drufoplast (mit angespritztem Löffelgriff) 3 mm

klar-transparent

- sehr hohe Bruchfestigkeit

Aufheizzeiten  in Minuten

Abkühlzeiten  in Minuten und unter Druck bzw. Vakuum

	Drufoformat SQ/TE	Vacfoformat U	Vacfoformat 2000	
				
Drufoplast				
2 mm	1:35	1:30	1:05	1:30
3 mm	1:55	1:55	1:20	2:00
Drufoplast (mit Löffelgriff)				
3 mm	2:05	2:10	1:35	2:10

Basisplatten

Drufoplast 2 mm

4210Z	rosa	15 Stück
-------	------	----------

Drufoplast 3 mm

42081Z	rosa	30 Stück
--------	------	----------

Drufoplast (mit angespritztem Löffelgriff) **3 mm**

4214	klar-transparent	10 Stück
------	------------------	----------

4215	klar-transparent	100 Stück
------	------------------	-----------

Basisplatten

Drufoplast 3 mm

rosa

- sehr hohe Bruchfestigkeit
- passende Löffelgriffe erhältlich

Drufoplast (mit angespritztem Löffelgriff) 3 mm

klar-transparent

- sehr hohe Bruchfestigkeit

Aufheizzeiten  in Minuten

Abkühlzeiten  in Minuten und unter Druck bzw. Vakuum

	Drufoformat SQ/TE	Vacfoformat U	Vacfoformat 2000	
				
Drufoplast 3 mm	1:55	1:55	1:20	2:00
Drufoplast (mit Löffelgriff) 3 mm	2:05	2:10	1:35	2:10

Individuelle Löffel

Drufoplast 3 mm

42081Z	rosa	30 Stück
--------	------	----------

Drufoplast (mit angespritztem Löffelgriff) **3 mm**

4214	klar-transparent	10 Stück
------	------------------	----------

4215	klar-transparent	100 Stück
------	------------------	-----------

Individuelle Löffel

Biolit D 1 / 2 mm

klar-transparent

- heiß sterilisierbar
- Vortrocknung erforderlich
(4 Stunden pro mm Schichtstärke bei 80°C)
- hochtransparent
- verbindet sich mit Acrylat

Aufheizzeiten  in Minuten

Abkühlzeiten  in Minuten und unter Druck bzw. Vakuum

	Drufoformat SQ/TE	Vacfoformat U	Vacfoformat 2000	
				
Biolit D				
1 mm	1:45	1:45	1:35	1:45
2 mm	2:15	2:15	2:05	2:15

Verbandplatten

Biolit D 1 mm

4260	klar-transparent	10 Stück
------	------------------	----------

Biolit D 2 mm

4262	klar-transparent	10 Stück
------	------------------	----------

Verbandplatten

Biolon 0,5 / 0,75 mm

klar-transparent

- zäh-elastisch
- hochtransparent
- verbindet sich mit Acrylat

Drufofen H 0,6 / 0,8 mm

natur

- hart-elastische Konsistenz
- verbindet sich nicht mit Acrylat

Aufheizzeiten  in Minuten

Abkühlzeiten  in Minuten und unter Druck bzw. Vakuum

	Drufofen SQ/TE	Vacfofen U	Vacfofen 2000	
				
Biolon				
0,5 mm	1:00	0:55	1:00	1:00
0,75 mm	1:05	0:55	1:05	1:00
Drufofen H				
0,6 mm	1:30	1:20	1:00	1:20
0,8 mm	1:40	1:50	1:10	1:50

Provisorienherstellung

Biolon 0,5 mm

42300	klar-transparent	20 Stück
423001	klar-transparent	50 Stück

Biolon 0,75 mm

42303	klar-transparent	20 Stück
423031	klar-transparent	40 Stück

Drufofen H 0,6 mm

423641	natur	40 Stück
--------	-------	----------

Drufofen H 0,8 mm

423681	natur	40 Stück
--------	-------	----------

Provisorienherstellung

Biolit D 2 mm

klar-transparent

- heiß sterilisierbar
- Vortrocknung erforderlich
(4 Stunden pro mm Schichtstärke bei 80°C)
- hochtransparent
- verbindet sich mit Acrylat

Biolon 2 / 3 mm

klar-transparent

- zäh-elastisch
- hochtransparent
- verbindet sich mit Acrylat

Aufheizzeiten  in Minuten

Abkühlzeiten  in Minuten und unter Druck bzw. Vakuum

	Drufoformat SQ/TE	Vacfoformat U	Vacfoformat 2000	
				
Biolit D 2 mm	2:15	2:15	2:05	2:15
Biolon 2 mm	1:45	1:50	1:30	1:50
3 mm	2:15	2:20	2:00	2:20

KFO Geräte

Biolit D 2 mm

4262	klar-transparent	10 Stück
------	------------------	----------

Biolon 2 mm

42398	klar-transparent	15 Stück
-------	------------------	----------

423991	klar-transparent	50 Stück
--------	------------------	----------

Biolon 3 mm

4241	klar-transparent	10 Stück
------	------------------	----------

42411	klar-transparent	30 Stück
-------	------------------	----------

KFO Geräte

Biolit D 1 / 2 mm

klar-transparent

- heiß sterilisierbar
- Vortrocknung erforderlich
(4 Stunden pro mm Schichtstärke bei 80°C)
- hochtransparent
- verbindet sich mit Acrylat

Biolon 2 mm

klar-transparent

- zäh-elastisch
- hochtransparent
- verbindet sich mit Acrylat

Drufoplast (mit angespritztem Löffelgriff) **3 mm**

klar-transparent

- sehr hohe Bruchfestigkeit

Aufheizzeiten  in Minuten

Abkühlzeiten  in Minuten und unter Druck bzw. Vakuum

	Drufoformat SQ/TE	Vacfoformat U	Vacfoformat 2000	
				
Biolit D				
1 mm	1:45	1:45	1:35	1:45
2 mm	2:15	2:15	2:05	2:15
Biolon				
2 mm	1:45	1:50	1:30	1:50
Drufoplast (mit Löffelgriff)				
3 mm	2:05	2:10	1:35	2:10

Röntgenschablonen

Biolit D 1 mm

4260	klar-transparent	10 Stück
------	------------------	----------

Biolit D 2 mm

4262	klar-transparent	10 Stück
------	------------------	----------

Biolon 2 mm

42398	klar-transparent	15 Stück
-------	------------------	----------

423991	klar-transparent	50 Stück
--------	------------------	----------

Drufoplast (mit angespritztem Löffelgriff) **3 mm**

4214	klar-transparent	10 Stück
------	------------------	----------

4215	klar-transparent	100 Stück
------	------------------	-----------

Röntgenschablonen

Drufofen W 0,65 / 0,8 mm

blau, natur

- weich-elastische Konsistenz
- rückstandslose Verbrennung
- verbindet sich nicht mit der Folgefolie

UZF (Unterziehfolie) 0,1 mm

rot

- sehr dünn, nur zusammen mit einer anderen Folie plastifizierbar
- im Ø 42 mm für Handadapter lieferbar

Aufheizzeiten  in Minuten

Abkühlzeiten  in Minuten und unter Druck bzw. Vakuum

	Drufofen SQ/TE	Vacfofen U	Vacfofen 2000	
				
Drufofen W				
0,65 mm	1:15	1:05	0:50	2:00
0,8 mm	1:25	1:20	1:05	2:00
UZF	Es gelten die Zeiten der 2. Folie			
0,1 mm				

Platzhalter

Drufofen W 0,65 mm

423461B	blau	40 Stück
423461N	natur	40 Stück

Drufofen W 0,8 mm

423481B	blau	40 Stück
423481N	natur	40 Stück

UZF (Unterziehfolie) 0,1 mm

42470	rot	100 Stück
42474-42	rot (ø 42 mm)	100 Stück

Platzhalter

Drufofen H 0,6 / 0,8 mm

natur

- hart-elastische Konsistenz
- rückstandslose Verbrennung
- im Ø 42 mm für Handadapter lieferbar

Drufofen W 0,45 / 0,65 / 0,8 / 1 mm

blau, natur

- weich-elastische Konsistenz
- rückstandslose Verbrennung
- im Ø 42 mm für Handadapter lieferbar

Aufheizzeiten  in Minuten

Abkühlzeiten  in Minuten und unter Druck bzw. Vakuum

	Drufofen SQ/TE	Vacfofen U	Vacfofen 2000	
				
Drufofen H				
0,6 mm	1:30	1:20	1:00	1:20
0,8 mm	1:40	1:50	1:10	1:50
Drufofen W				
0,45 mm	1:10	0:50	0:40	1:30
0,65 mm	1:15	1:05	0:50	2:00
0,8 mm	1:25	1:20	1:05	2:00
1 mm	1:40	1:40	1:20	2:30

Gusskppchen

Drufohlen H 0,6 mm

423641	natur		40 Stück
42374-42	natur	(ø 42 mm)	150 Stück

Drufohlen H 0,8 mm

423681	natur		40 Stück
--------	-------	--	----------

Drufohlen W 0,45 mm

423441N	natur		40 Stück
42384N-42	natur	(ø 42 mm)	150 Stück

Drufohlen W 0,65 mm

423461N	natur		40 Stück
42386N-42	natur	(ø 42 mm)	100 Stück
423461B	blau		40 Stück

Drufohlen W 0,8 mm

423481N	natur		40 Stück
42388N-42	natur	(ø 42 mm)	100 Stück
423481B	blau		40 Stück

Drufohlen W 1 mm

423401N	natur		30 Stück
---------	-------	--	----------

Gusskäppchen

BioBleach® hard 0,5 mm

klar-transparent

- zur Anfertigung von stabilen, am Zahnfleischsaum endenden Bleaching-/Medikamentenschienen
- leicht elastisch, geeignet auch bei leicht unter sich gehenden Bereichen
- hochtransparent
- verbindet sich mit Acrylat

BioBleach® soft 1 mm

transparent

- zur Anfertigung von weichen, über den Gingivalsaum hinausreichenden Bleaching-/Medikamentenschienen
- hohe Formkonstanz, 95 Shore A

Drufosoft® 1 / 1,5 mm

transparent

- weich- elastisch, 82 Shore A
- hohe Rückstellkraft
- laminierbar

Aufheizzeiten  in Minuten

Abkühlzeiten  in Minuten und unter Druck bzw. Vakuum

	Drufomat SQ/TE	Vacfomat U	Vacfomat 2000	
				
BioBleach® hard 0,5 mm	1:00	0:55	1:00	1:00
BioBleach® soft 1 mm	1:05	1:05	0:50	3:00
Drufosoft® 1 mm	0:45	0:40	0:40	3:00
1,5 mm	1:00	0:55	0:50	3:00

Bleaching

BioBleach® hard 0,5 mm

4294	klar-transparent	20 Stück
------	------------------	----------

BioBleach® soft 1 mm

4300	transparent	20 Stück
------	-------------	----------

Drufosoft® 1 mm

4245	transparent	20 Stück
------	-------------	----------

42451	transparent	50 Stück
-------	-------------	----------

Drufosoft® 1,5 mm

4252	transparent	20 Stück
------	-------------	----------

42531	transparent	50 Stück
-------	-------------	----------

Bleaching

Biolit D 1 / 2 mm

klar-transparent

- heiß sterilisierbar
- Vortrocknung erforderlich
(4 Stunden pro mm Schichtstärke bei 80°C)
- hochtransparent
- verbindet sich mit Acrylat

Biolon 0,75 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm

klar-transparent

- zäh-elastisch
- hochtransparent
- verbindet sich mit Acrylat

Drufosoft® pro 3 mm

transparent

- hart elastisch, 95 Shore A
- hohe Rückstellkraft
- laminierbar

Kombiplast 1,8 / 3 mm

transparent

- harte Oberfläche, weiche Unterseite
für erhöhten Tragekomfort
- verbindet sich mit Acrylat

Aufheizzeiten  in Minuten

Abkühlzeiten  in Minuten und unter Druck bzw. Vakuum

	Drufoformat SQ/TE	Vacfoformat U	Vacfoformat 2000	
				
Biolit D				
1 mm	1:45	1:45	1:35	1:45
2 mm	2:15	2:15	2:05	2:15
Biolon				
0,75 mm	1:05	0:55	1:05	1:00
1 mm	1:10	1:00	1:10	1:10
1,5 mm	1:20	1:30	1:20	1:20
2 mm	1:45	1:50	1:30	1:50
3 mm	2:15	2:20	2:00	2:20
Drufosoft® pro				
3 mm	2:15	2:20	1:45	7:00
Kombiplast				
1,8 mm	1:30	--	1:05	2:30
3 mm	1:50	--	1:50	2:30

Schientherapie

Biolit D 1 mm

4260	klar-transparent	10 Stück
------	------------------	----------

Biolit D 2 mm

4262	klar-transparent	10 Stück
------	------------------	----------

Biolon 0,75 mm

42303	klar-transparent	20 Stück
-------	------------------	----------

423031	klar-transparent	40 Stück
--------	------------------	----------

Biolon 1 mm

42396	klar-transparent	20 Stück
-------	------------------	----------

423971	klar-transparent	50 Stück
--------	------------------	----------

Biolon 1,5 mm

42402	klar-transparent	20 Stück
-------	------------------	----------

424021	klar-transparent	50 Stück
--------	------------------	----------

Biolon 2 mm

42398	klar-transparent	15 Stück
-------	------------------	----------

423991	klar-transparent	50 Stück
--------	------------------	----------

Biolon 3 mm

4241	klar-transparent	10 Stück
------	------------------	----------

42411	klar-transparent	30 Stück
-------	------------------	----------

Drufosoft® pro 3 mm

4230	transparent	10 Stück
------	-------------	----------

Kombiplast 1,8 mm

4290	transparent	10 Stück
------	-------------	----------

Kombiplast 3 mm

4291	transparent	10 Stück
------	-------------	----------

Schientherapie

Biolon 2 mm

klar-transparent

- als harte Einlage zur besseren Kraftverteilung
- zäh-elastisch
- hochtransparent
- verbindet sich mit Acrylat

Drufosoft®

- weich- elastisch, 82 Shore A
- hohe Rückstellkraft
- laminierbar

Lieferbar in transparent und farbig:

Drufosoft® transparent 2 / 3 / 4 mm

Drufosoft® colour 3 mm

- in vielen verschiedenen Farben
lieferbar (s. Farbkarte)

Drufosoft® bicolour 3 mm

- in verschiedenen Farbkombinationen
lieferbar (s. Farbkarte)

Drufosoft® tricolour 3 mm

- in verschiedenen Farbkombinationen
lieferbar (s. Farbkarte)

Aufheizzeiten  in Minuten

Abkühlzeiten  in Minuten und unter Druck bzw. Vakuum

	Drufoformat SQ/TE	Vacfoformat U	Vacfoformat 2000	
				
Biolon 2 mm	1:45	1:50	1:30	1:50
Drufosoft® transparent 2 mm	1:05	1:10	1:00	3:30
3 mm	1:50	1:40	1:20	6:00
4 mm	2:10	2:15	1:30	7:00
Drufosoft® colour/ bicolour/ tricolour 3 mm	1:35-1:50	1:20-1:35	0:55-1:10	6:00

Mundschutz

Biolon 2 mm

42398	klar-transparent	15 Stück
423991	klar-transparent	50 Stück

Drufosoft® 2 mm

4250	transparent	15 Stück
42511	transparent	50 Stück

Drufosoft® 3 mm

4248	transparent	10 Stück
42481	transparent	30 Stück

Drufosoft® 4 mm

42472	transparent	15 Stück
424901	transparent	75 Stück

Drufosoft® colour 3 mm

4248-2	neon-rot	10 Stück
4248-3	neon-grün	10 Stück
4248-4	neon-gelb	10 Stück
4248-5	blau	10 Stück
4248-6	gelb	10 Stück
4248-7	schwarz	10 Stück
4248-8	weiß	10 Stück
4248-9	pink	10 Stück
4248-17	rot	10 Stück
4248-18	türkis	10 Stück
4248-19	gold	10 Stück
4248-20	silber	10 Stück
4248-21	blau-opak	10 Stück
4248-22	grün	10 Stück
4248-23	lila	10 Stück
4248-24	hellblau	10 Stück
4248-25	bordeaux	10 Stück

Drufosoft® bicolour 3 mm

4270-11	gelb/schwarz/gelb	3 Stück
4270-12	weiß/blau/weiß	3 Stück
4270-13	rot/blau/rot	3 Stück

Drufosoft® tricolour 3 mm

4275-14	schwarz/rot/gelb	3 Stück
4275-15	blau/weiß/rot	3 Stück
4275-16	rot/grün/blau	3 Stück

Drufosoft® colourmix 3 mm

4265	1 Folie / Farbe	24 Stück
------	-----------------	----------

Mundschutz

Biolon 0,75 mm

klar-transparent

- zäh-elastisch
- hochtransparent
- verbindet sich mit Acrylat

Drufosoft®

- weich- elastisch, 82 Shore A
- hohe Rückstellkraft
- laminierbar

Lieferbar in transparent und farbig:

Drufosoft® 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 mm

transparent

Drufosoft® colour 3 mm

- in vielen verschiedenen Farben
lieferbar (s. Farbkarte)

Drufosoft® colour 4 mm

- in vielen verschiedenen Farben
lieferbar (s. Farbkarte)

Drufosoft® bicolour 3 mm

- in verschiedenen Farbkombinationen
lieferbar (s. Farbkarte)

Drufosoft® tricolour 3 mm

- in verschiedenen Farbkombinationen
lieferbar (s. Farbkarte)

Drufosoft® pro 3 mm

transparent

- hart elastisch, 95 Shore A
- hohe Rückstellkraft
- laminierbar

Aufheizzeiten  in Minuten

Abkühlzeiten  in Minuten und unter Druck bzw. Vakuum

	Drufoformat SQ/TE	Vacfoformat U	Vacfoformat 2000	
				
Biolon 0,75 mm	1:05	0:55	1:05	1:00
Drufosoft® transparent 1,5 mm	1:00	0:55	0:50	3:00
2 mm	1:05	1:10	1:00	3:30
3 mm	1:50	1:40	1:20	6:00
4 mm	2:10	2:15	1:30	7:00
5 mm	2:45	--	2:00	8:30
Drufosoft® colour/ bicolour/ tricolour 3 mm	1:35-1:50	1:20-1:35	0:55-1:10	6:00
Drufosoft® colour 4 mm	2:20-2:35	2:25-2:40	1:45-2:00	7:10
Drufosoft® pro 3 mm	2:15	2:20	1:45	7:00

Positioner/Retainer

Biolon 0,75 mm

42303	klar-transparent	20 Stück
423031	klar-transparent	40 Stück

Drufosoft® 1,5 mm

4252	transparent	20 Stück
42531	transparent	50 Stück

Drufosoft® 2 mm

4250	transparent	15 Stück
42511	transparent	50 Stück

Drufosoft® 3 mm

4248	transparent	10 Stück
42481	transparent	30 Stück

Drufosoft® 4 mm

42472	transparent	15 Stück
424901	transparent	75 Stück

Drufosoft® 5 mm

4225	transparent	15 Stück
------	-------------	----------

Drufosoft® colour 3 mm

4248-2	neon-rot	10 Stück
4248-3	neon-grün	10 Stück
4248-4	neon-gelb	10 Stück
4248-5	blau	10 Stück
4248-6	gelb	10 Stück
4248-7	schwarz	10 Stück
4248-8	weiß	10 Stück
4248-9	pink	10 Stück
4248-17	rot	10 Stück
4248-18	türkis	10 Stück
4248-19	gold	10 Stück
4248-20	silber	10 Stück
4248-21	blau-opak	10 Stück
4248-22	grün	10 Stück
4248-23	lila	10 Stück
4248-24	hellblau	10 Stück
4248-25	bordeaux	10 Stück

Drufosoft® colour 4 mm

Für Bestellungen dieses Materials ersetzen Sie bitte die 4248 der Art.-Nr. von Drufosoft® colour 3 mm durch 4247

Drufosoft® bicolour 3 mm

4270-11	gelb/schwarz/gelb	3 Stück
4270-12	weiß/blau/weiß	3 Stück
4270-13	rot/blau/rot	3 Stück

Drufosoft® tricolour 3 mm

4275-14	schwarz/rot/gelb	3 Stück
4275-15	blau/weiß/rot	3 Stück
4275-16	rot/grün/blau	3 Stück

Drufosoft® colourmix 3 mm

4265	1 Folie / Farbe	24 Stück
------	-----------------	----------

Drufosoft® pro 3 mm

4230	transparent	10 Stück
------	-------------	----------

012005000001110607
D-770023



**Dreve Dentamid GmbH • Max-Planck-Straße 31 • 59423 Unna/Germany
Tel +49 2303 8807-0 • Fax +49 2303 8807-55 • E-Mail info@dreve.de • www.dreve.com**