



Separator

Gebrauchsanleitung



Separator

Gebruiksaanwijzing



Produktbeschreibung:

Der Separator ist ein Trennmittel für nicht kompatible Materialien, z. B. Modralit® 3K / Polyätherabformungen, A-Silikone / C-Silikone oder für gleiche Materialien, z. B. A-Silikone / A-Silikone.

Verarbeitung:

1. Das Basismaterial (z. B. eine Abformung mit Implantatpfählern) von Verunreinigungen und Speichelresten befreien und mit Druckluft vorsichtig trockenblasen.
2. Den Separator gleichmäßig dünn in alle Bereiche des Basismaterials sprühen, an denen ein Kontakt mit dem nicht kompatiblen Material geplant ist.
3. Die vollständige Benetzung kann anhand einer glänzenden Oberfläche kontrolliert werden. Wichtig: Nicht mit Druckluft trocknen!
4. Die Trocknungszeit beträgt ca. 1 – 2 Minuten. Der abgetrocknete Separator weist eine matte, nicht mehr glänzende Oberfläche gegeben.
5. Beim Auftragen der zweiten Materialschicht darauf achten, daß die Trennschicht nicht durch Instrumente / Mischkanülen verletzt wird.
6. Weitere Verarbeitung mit den oben genannten Materialien nach Herstellerangaben.

Wichtige Hinweise

- Eine Trennung von Polyätherabformungen zu additionsvernetzenden Silikonen ist mit dem Separator nicht möglich.
- Nicht gegen eine Flamme oder auf glühende Gegenstände sprühen.
- Allergische Reaktionen auf Produktbestandteile können bei empfindlichen Personen nicht ausgeschlossen werden.
- Das Produkt ist ausschließlich für den o.g. Einsatzbereich bestimmt und ist nur von fachlich qualifizierten und eingewiesenen Personen zu verwenden.
- Die Angaben zu diesem Produkt sich stützen auf ausführliche anwendungstechnische Praxis und intensiver Forschungsarbeit. Aus Gründen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen am Produkt vor.

Lieferform: 50 ml Flasche mit Pinseleinsatz und Sprühkopf.
REF D4305

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene

Gefahrenhinweise

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. **H304** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. **H411** Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. **P241** Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/ Beleuchtungsanlagen verwenden.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. **P405** Unter Verschluss aufbewahren. **P501** Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen/ regionalen/ nationalen/ internationalen Vorschriften.

Die Dreve Dentamid GmbH haftet nicht für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung des Materials hervorgerufen werden.



2022-12-19 / Rev. 00
Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31 • 59423 Unna / Germany
Tel.: +49 2303 8807-0 • Fax: +49 2303 8807-55
www.dentamid.dreve.de

Productbeschrijving:

De Separator is een scheidingsmiddel voor niet compatibele materialen, b.v. Modralit® K / polyetherafdrucken, A-silicone/C-silicone of voor gelijke materialen, b.v. A-silicone/A-silicone.

Verwerken:

1. Speekselresten en vuil van het basismateriaal (b.v. een afdruck met implantaatpijlers) verwijderen en voorzichtig met perslucht droogblazen.
2. De separator gelijkmatig dun in alle bereiken van het basismateriaal sproeien waaraan een contact met het niet compatibele materiaal geplant is.
3. Het volledig nat zijn kan aan de hand van een glanzend oppervlak gecontroleerd worden. Belangrijk: Niet met perslucht drogen!
4. De droogtijd bedraagt ca. 1 – 2 minuten. De afgedroogde Separator vertoont een mat, niet meer glanzend oppervlak.
5. Bij het aanbrengen van de tweede materiaal laag erop letten dat de scheidingslaag niet door instrumenten/mengcanules beschadigd wordt.
6. Verdere verwerking met de hierboven genoemde materialen volgens de gegevens van de fabrikant.

Belangrijke aanwijzingen:

- Een scheiding van polyetherafdrucken van met toevoegingsmiddelen nat gemaakte siliconen is met de Separator niet mogelijk.
- Niet tegen een vlam of op gloeiende voorwerpen sproeien.
- Allergische reacties op productbestanddelen kunnen bij gevoelige personen niet uitgesloten worden.
- Het product is uitsluitend voor de hierboven beschreven toepassing bestemd en moet door gekwalificeerde en geïnstrueerde personen gebruikt worden.
- De informatie over dit product is gebaseerd op uitvoerige toepassingstechnische praktijk en intensief onderzoekswerk. Voor de verdere ontwikkeling zijn wijzigingen aan het product voorbehouden.

Levervorm: Art.-nr. D4305 50 ml fles met penselelement en sproeikop.
REF D4305

Bevat: Hydrocarbons, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene

Gevenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. **H336** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. **H411** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. **P241** Explosie veilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-apparatuur gebruiken. **P301+P310** NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. **P303+P361+P353** BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. **P405** Achter slot bewaren. **P501** De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Dreve Dentamid GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die door verkeerd gebruik van het product werd teweeggebracht.



2022-12-19 / Rev. 00
Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31 • 59423 Unna / Germany
Tel.: +49 2303 8807-0 • Fax: +49 2303 8807-55
www.dentamid.dreve.de