



Separator

Gebrauchsanleitung



Separator

Gebruiksaanwijzing



Produktbeschreibung:

Der Separator ist ein Trennmittel für nicht kompatible Materialien, z. B. Modralit® 3K / Polyätherabformungen, A-Silikone / C-Silikone oder für gleiche Materialien, z. B. A-Silikone / A-Silikone.

Verarbeitung:

1. Das Basismaterial (z. B. eine Abformung mit Implantatpfählern) von Verunreinigungen und Speichelresten befreien und mit Druckluft vorsichtig trockenblasen.
2. Den Separator gleichmäßig dünn in alle Bereiche des Basismaterials sprühen, an denen ein Kontakt mit dem nicht kompatiblen Material geplant ist.
3. Die vollständige Benetzung kann anhand einer glänzenden Oberfläche kontrolliert werden. Wichtig: Nicht mit Druckluft trocknen!
4. Die Trocknungszeit beträgt ca. 1 – 2 Minuten. Der abgetrocknete Separator weist eine matte, nicht mehr glänzende Oberfläche auf.
5. Beim Auftragen der zweiten Materialschicht darauf achten, dass die Trennschicht nicht durch Instrumente / Mischkanülen verletzt wird.
6. Weitere Verarbeitung mit den oben genannten Materialien nach Herstellerangaben.

Wichtige Hinweise

- Eine Trennung von Polyätherabformungen zu additionsvernetzenden Silikonen ist mit dem Separator nicht möglich.
- Nicht gegen eine Flamme oder auf glühende Gegenstände sprühen.
- Allergische Reaktionen auf Produktbestandteile können bei empfindlichen Personen nicht ausgeschlossen werden.
- Das Produkt ist ausschließlich für den o.g. Einsatzbereich bestimmt und ist nur von fachlich qualifizierten und eingewiesenen Personen zu verwenden.
- Die Angaben zu diesem Produkt sich stützen auf ausführliche anwendungstechnische Praxis und intensiver Forschungsarbeit. Aus Gründen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen am Produkt vor.

Lieferform: 50 ml Flasche mit Pinseleinsatz und Sprühkopf.
REF D4305

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene

Gefahrenhinweise

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Die Dreve Dentamid GmbH haftet nicht für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung des Materials hervorgerufen werden.



Productbeschrijving:

De Separator is een scheidingsmiddel voor niet compatibele materialen, b.v. Modralit® K / polyetherafdrucken, A-silicone/C-silicone of voor gelijke materialen, b.v. A-silicone/A-silicone.

Verwerken:

1. Speekselresten en vuil van het basismateriaal (b.v. een afdruck met implantaatpijlers) verwijderen en voorzichtig met perslucht droogblazen.
2. De separator gelijkmatig dun in alle bereiken van het basismateriaal sproeien waaraan een contact met het niet compatibele materiaal geplant is.
3. Het volledig nat zijn kan aan de hand van een glanzend oppervlak gecontroleerd worden. Belangrijk: Niet met perslucht drogen!
4. De droogtijd bedraagt ca. 1 – 2 minuten. De afgedroogde Separator vertoont een mat, niet meer glanzend oppervlak.
5. Bij het aanbrengen van de tweede materiaal laag erop letten dat de scheidingslaag niet door instrumenten/mengcanules beschadigd wordt.
6. Verdere verwerking met de hierboven genoemde materialen volgens de gegevens van de fabrikant.

Belangrijke aanwijzingen:

- Een scheiding van polyetherafdrucken van met toevoegingsmiddelen nat gemaakte siliconen is met de Separator niet mogelijk.
- Niet tegen een vlam of op gloeiende voorwerpen sproeien.
- Allergische reacties op productbestanddelen kunnen bij gevoelige personen niet uitgesloten worden.
- Het product is uitsluitend voor de hierboven beschreven toepassing bestemd en moet door gekwalificeerde en geïnstrueerde personen gebruikt worden.
- De informatie over dit product is gebaseerd op uitvoerige toepassingstechnische praktijk en intensief onderzoekswerk. Voor de verdere ontwikkeling zijn wijzigingen aan het product voorbehouden.

Levertorm: 50 ml fles met penseelelement en sproeikop.
REF D4305

Bevat: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes

Gevenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P331 GEEN braken opwekken.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Dreve Dentamid GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die door verkeerd gebruik van het product werd teweeggebracht.

